

FRANÇAIS

Kit de Prélèvement d'Urine (DTC2)

En vous assurant que les couvercles des bouteilles ont été bien serré, placer la bouteille "A" à bouchon vert VERS LE HAUT dans le boîtier "A" et la bouteille "B" à bouchon jaune VERS LE HAUT dans le boîtier "B".


En vous assurant que le couvercle est bien en place, tourner le récipient à l'envers et placer sur une surface stable. Pousser fermement vers le bas pour créer une fermeture hermétique.

ENGLISH

Urine Sampling Kit (DTC2)

Ensuring that the caps of the sample bottles have been sufficiently tightened, place the "A" bottle UPRIGHT in the "A" canister and the "B" bottle UPRIGHT in the "B" canister.

Ensuring that the lid is in the correct position, invert canister and place on a firm surface then push down hard until fully closed.

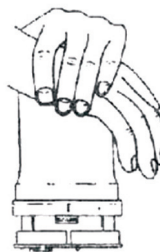

DEUTSCHE

Urin-Musterstück-Gerät (DTC2)

Stellen Sie sicher dass die Kappen der Muster/Beispielflaschen fest verschlossen worden sind. Platzieren Sie Flasche "A" AUFRECHT in Kanister "A" und Flasche "B" AUFRECHT in Kanister "B".

Nach Sicherstellung des Verschlusses in die richtige Position, drehen Sie die Kanister und stellen sie auf eine feste Oberfläche, drücken Sie dann stark bis zur völligen Schliessung.