

FRANÇAIS

Récepteur collecteur d'urine (UCV)

Pour fermer:

Placer le récepteur sur une surface stable, et en vous assurant que le couvercle est bien en place, pousser fermement vers le bas avec les deux mains pour créer une fermeture hermétique.

Pour ouvrir:

Placer le récepteur sur une surface stable, maintenir en place d'une main et tirer sur la bague avec l'autre main (tirer la bague vers soi pour l'enlever).

**N'ESSAYER PAS D'OUVRIRE CE
PRODUIT TOUT EN LE TENANT
DANS VOTRE MAIN.**

ENGLISH

Urine Collection Vessel (UCV)

To close:

Place the container on a firm surface and, ensuring that the lid is in the correct position, push down hard with both hands to form a tight seal.

To open:

Place the container on a firm surface, hold firmly with one hand and pull the ring pull with the other hand (use a peeling motion, pulling the ring pull towards you).

**DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE UCV
WHILST HOLDING IT IN YOUR HAND.**

DEUTSCHE

Urinflasche (UCV)

Zu schließen:-

Stellen Sie das Gefäß auf einer festen Fläche. Bitte darauf achten daß der Deckel in der richtigen Position ist. Mit beiden Händen auf den Deckel drücken um einen perfekten Verschluss zu sichern.

Zu öffnen:-

Stellen Sie das Gefäß auf einer festen Fläche. Mit einer Hand hält man das Gefäß fest und mit der anderen Hand zieht man am Verschluss

Achtung:

**Während des Öffnens nicht in den
Händen halten.**